
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98; tel. serwis (+48 22) 853 30 10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANICZNA WAGA ŁAZIENKOWA TECH-MED TM-715

Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki pomiaru:

- Wagę ustawiamy na płaskiej powierzchni.
- Nie używamy wagi na dywanie lub wykładzinie.
- Upewniamy się, czy podziałka jest dokładnie na cyfrze 0 – jeżeli nie, skalujemy wagę przy pomocy pokrętki.
- Wagę czyścimy wilgotną szmatką. Nie używamy środków chemicznych.

Informacje techniczne:

- Maksymalna waga: 160 kg
- Dokładność: 0 – 80 kg +/- 1.2 d
> 80 kg +/- 2.0 d