

# Aparat do masażu HV-M28

## Instrukcja obsługi

Gratulujemy wyboru **Masażera HV-M28**, urządzenia umożliwiającego poprawę zdrowia i witalności. Wyposażony w cztery elektrody samoprzylepne Masażer to narzędzie relaksacyjne łagodzące wszechobecne w dzisiejszych czasach napięcie. Można ręcznie wybrać natężenie oraz prędkość masażu, przy czym do wyboru są trzy tryby: opukiwania, ugniatania oraz wibracji.

Ponadto urządzenie wyświetla godzinę i datę (dzień, miesiąc, rok) oraz może działać jako budzik.

### 1. Funkcje

1. Różne rodzaje masażu, które pozwalają szybko usunąć zmęczenie.
2. Wyświetlanie aktualnego czasu i kalendarza.
3. Wyświetlanie aktualnej temperatury w skali Fahrenheita lub Celsjusza.
4. Wbudowane cztery alarmy oraz funkcja przypominania co godzinę.
5. Odtwarzania 15 różnych melodii.
6. Cztery elektrody (samoprzylepne) udostępniające siedem trybów masażu
7. Podawanie czasu głosem.

### 2. Instalowanie baterii

1. Należy przesunąć w dół wieczko pojemnika na baterie.
2. Włożyć do środka trzy baterie typu AAA. Po prawidłowym włożeniu baterii słyszalne będzie kliknięcie. W przeciwnym razie baterie należy wyjąć i włożyć na nowo.
3. Starannie zamknąć wieczko baterii.
4. Podczas wkładania baterii nie należy dotykać żadnych przycisków.

### 3. Korzystanie z Masażera

#### 1) ROZPOCZĘCIE MASOWANIA

1. Należy podłączyć elektrody.
2. Przyczepić elektrody do wybranego miejsca na ciele. Terapia rozpocznie się automatycznie.
3. Nacisnąć przycisk *TALK/MODE* w celu zmiany trybu pracy na opukiwanie, ugniatanie lub wibracja, albo nacisnąć przycisk *SET/R.S.* w celu wyzerowania czasu terapii.
4. Nacisnąć przycisk *((,))*/*U.* oraz sześciokrotnie przycisk *Y.C.F/D.* w celu zmiany natężenia masażu, albo przyciski *A.S./F.*, a następnie *?/S.* w celu zmiany prędkości.
5. Każda terapia trwa kwadrans.

#### ABY PRZERWAĆ MASAŻ NALEŻY ODŁĄCZYĆ ELEKTRODY

	Tryb 1	Tryb 2	Tryb 3	Tryb 4	Tryb 5	Tryb 6
<b>Funkcja masażu</b>	oklepywanie	oklepywanie	oklepywanie	oklepywanie	ugniatanie	wibracja
<b>Wszystkie tryby mogą być używane do masażu ramion, nóg, szyi, talii oraz pleców.</b>						

## **2) USTAWIANIE CZASU, KALENDARZA I BUDZIKA**

Aby przejść do trybu ustawień, należy nacisnąć przycisk *SET/R.S.* Dostępnych jest pięć parametrów: czas (time set), alarm 1 (alarm1 set), alarm 2 (alarm2 set), alarm 3 (alarm3 set) i alarm 4 (alarm4 set).

### **USTAWIANIE CZASU**

1. W trybie ustawiania czasu (*Time Set*) należy nacisnąć przycisk *?/S.* w celu przełączania się między godzinami, minutami, latami, miesiącami i dniami.
2. Nacisnąć przycisk *Y.C.F/D* w celu zmniejszenia lub przycisk *((,))/U.* w celu zwiększenia wartości wybranego ustawienia.
3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk *TALK/MODE.*

### **USTAWIANIE ALARMU**

4. Należy powtórzyć procedurę ustawiania czasu w sposób przedstawiony powyżej dla wszystkich czterech trybów alarmu (alarm1 set, alarm2 set itp.).
5. Nacisnąć przycisk *A.S./F.* w celu wyłączenia alarmu lub wybrania innego dźwięku alarmu.
6. alarm off (alarm wyłączony);
7. alarm on, cock-like crow (alarm włączony, odgłos ptaków);
8. alarm on, music sound (alarm włączony, muzyka);
9. alarm on, „di di” sound (alarm włączony, dźwięk tonu przerywanego)
10. „symbol dzwonka” nie pojawi się na wyświetlaczu, jeśli alarm będzie wyłączony.
11. Po ustawieniu alarmu nacisnąć przycisk *TALK/MODE.*

### **USTAWIANIE RADIA**

Należy podłączyć słuchawki i użyć przełącznika obrotowego w celu włączenia lub wyłączenia radia. Po naciśnięciu przycisku *SCAN*, automatycznie zostanie ustawiona najbliższa stacja FM.

### **INNE FUNKCJE**

1. Naciśnięcie przycisku *?/S* powoduje odtworzenie jednej z 15 melodyjek. W celu zakończenia odtwarzania można nacisnąć dowolny przycisk.
2. Naciśnięcie przycisku *((,))/U.* włącza lub wyłącza funkcję przypominania co godzinę.
3. Naciśnięcie przycisku *Y.C.F/D.* powoduje wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza lub w Fahrenheita.
4. Naciśnięcie przycisku *A.S./F.* włącza lub wyłącza funkcję drzemki i alarmu.

## **4. OSTRZEŻENIA**

Osoby z chorobą serca lub jej podejrzeniem, kobiety w ciąży, osoby z nadciśnieniem, podwyższoną temperaturą, wrażliwą skórą lub innymi problemami ze zdrowiem powinny przed użyciem aparatu zasięgnąć opinii lekarza.

1. **NIE WOLNO** umieszczać elektrod w pobliżu serca.
2. Jeżeli w czasie używania aparatu pojawi się złe samopoczucie lub zmiana wrażliwości skóry na dotyk, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
3. Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Aparat należy chronić przed zamoczeniem i wysoką temperaturą.
5. **NIE WOLNO** używać aparatu razem z innym sprzętem medycznym.
6. Miganie wyświetlacza sygnalizuje wyczerpywanie się baterii.
7. Przed korzystaniem z aparatu należy mieć suchą i czystą skórę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje szybsze zużycie poduszek z elektrodami.

## **5. Dane techniczne**

1. Zasilanie: 3 baterie AAA.
2. Czas użytkowania z jednym kompletem baterii: 2 miesiące (po 15 min. dziennie).
3. Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 1KHz.
4. Waga: 106g (bez baterii).

Wymiary: 133 x 63 x 15mm.