


TM-OFT10

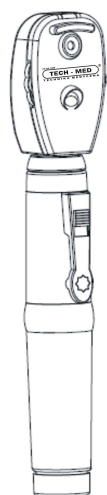

Oftalmoskop TM-OFT10

rok zał. 1949
TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA

Instrukcja obsługi

Przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Uwaga:

- Należy chronić oftalmoskop światłowodowy przed wodą, wilgocią, wstrząsem, upuszczeniem i ogniem.
- Nie należy dotykać soczewki bezpośrednio dłońmi ani twardymi przedmiotami.
- Należy używać specjalnej żarówki opisanej w instrukcji
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.

Ogólne informacje

Przeznaczenie

Oftalmoskop TM-OFT10 jest klasycznym urządzeniem medycznym używanym w okulistyce i laryngologii. Urządzenie wykorzystuje profesjonalny system soczewek, dzięki któremu lekarz może z łatwością ocenić stan oczu pacjenta.

Dane techniczne


- Udoskonalona technologia ksenonowo-halogenowa XHL
- 5 różnych szczelin świetlnych
- Zakres soczewek - 20 D do + 20 D





+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

- 2 baterie AA, 1,5V

Korzystanie z urządzenia

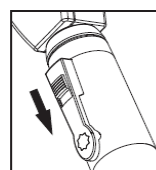

- Włącz urządzenie przesuwając włącznik w dół.

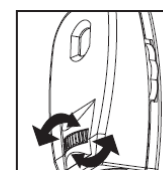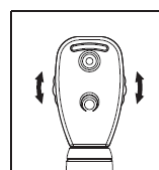


- Dokonaj wyboru zdolności zbierającej soczewki w zakresie od -20 do +20 dioptrii trzymając pokrętko regulacji z dwóch stron i przekręcając - rys. 1.
- Dokonaj wyboru szczeliny świetlnej za pomocą pokrętkła – rys. 2.

Konserwacja

* Wymiana części zapasowych

1. Wymiana żarówki


Odkręć górną część głowicy.
Wyjmij zużytą żarówkę ciągnąc w dół i
wymień ją na nową.

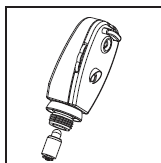

Uwaga: Należy używać specjalnej żarówki przeznaczony dla tego urządzenia. W momencie, gdy żarówka przepali się, jej temperatura jest nadal wysoka, dlatego należy odczekać 5 minut, aby uniknąć oparzenia.

2. Wymiana baterii

- A. Odkręć dolną pokrywę rękojeści;
- B. Wyjmij zużyte baterie i wymień na nowe baterie AA. Biegun dodatni „+” baterii powinien być zwrócony w stronę górnej części urządzenia;

 **Uwaga:** Baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie razem z odpadami domowymi.

* Bezpieczne korzystanie z baterii

- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych;
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

* Utrzymanie w czystości i dezynfekcja

- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz wizjer należy czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno używać żrących i polerujących środków.
Uwaga: Należy zapobiegać przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.

Dane techniczne

Żarówka	2,5V, 0,7A, Ø=3,8mm	
Baterie	2 baterie alkaliczne AA; 1.5V	
Obsługa	Temperatura	10 °C ~40 °C
	Wilgotność	30% ~75%
	Ciśnienie powietrza	700 hPa-1060 hPa
Przechowywanie	Temperatura	- 40 °C ~55°C
	Wilgotność	10% ~90%
	Ciśnienie powietrza	500 hPa~1060 hPa
Normy	Klasa I, IEC 60601-1	

