

rok zał. 1949

**TECH - MED**®

**TECHNIKA MEDYCZNA**  
B. Wójcik Spółka Jawna



00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98; tel. (+48 22) 654 64 92  
tel. serwis (+48 22) 853 30 10

#### KARTA GWARANCYJNA APARATU DO MASAŻU

TM-R10 SN-.....-

1. **TECH - MED**® udziela gwarancji na prawidłową pracę urządzenia na okres 12 miesięcy od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki przyrządu ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego urządzenia liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; stosowania niewłaściwego zasilanie oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią **TECH - MED**® i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

**Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:**

rok zał 1949

**TECH - MED**®  
**TECHNIKA MEDYCZNA**  
B. WÓJCIK s-ka jawna

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98  
**SKLEP FIRMOWY:** tel.: (22) 654 64 93  
**BIURO HANDLOWE:** tel.: (22) 654 64 92  
faks: (22) 620 77 42  
**SERWIS:** tel.: (22) 853 30 10  
www.techmed.pl  
techmed@techmed.pl



rok zał. 1949

**TECH - MED**®  
**TECHNIKA MEDYCZNA**

ISO ISO  
9001 13485

Aparat

**TM-R10**

do masażu

#### **Aparat do masażu TM-R10 wyszczupla, wzmacnia mięśnie i relaksuje**

- Najprostszy sposób na jednoczesne wykonywanie ćwiczeń i relaks
- Specjalnie zaprojektowana oś mimośrodowa, obracająca się o 360 stopni, wykonuje ponad 2500 obrotów na minutę
- Wyszczuplanie, wzmacnianie mięśni, relaks – wszystko to dzięki jednemu urządzeniu.

**Niezwykle wydajny!  
Prosty w obsłudze!**



## DZIAŁANIE

Aby móc w pełni cieszyć się korzyściami, jakie niesie ze sobą używanie tego produktu, proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją działania.

### Instrukcja

1. Załóż/zmień nakładkę masującą:
  - Usuń siatkowaną nakładkę ochronną (krok ❶)
  - Chwyć za dwa wgłębienia znajdujące się na podstawie głowicy obrotowej i naciskając je, zdejmij nakładkę. krok ❷
  - Nałóż inną nakładkę, a w razie potrzeby również siatkowaną nakładkę ochronną.
2. Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego.
3. W celu włączenia urządzenia, należy przekręcić przełącznik zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w kierunku napisu „ON”). Dalsze przekręcanie przełącznika przyspieszy pracę urządzenia. Aby spowolnić pracę urządzenia, należy przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Są dwa najwygodniejsze sposoby trzymania urządzenia:
  - Można trzymać urządzenie za jego środkową część (krok ❸)
  - lub za uchwyt krok ❹
5. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy przekręcać przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku napisu „OFF”), do momentu, aż dalsze przekręcanie nie będzie możliwe. Następnie należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.

### WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA


- Lekkie i łatwe do przenoszenia.
- Możliwość zwiększania i zmniejszania prędkości obrotów.
- Duża prędkość obrotów – aż do 2500 obrotów na minutę.
- Wygodny uchwyt pokryty miękką gumą
- 5 rodzajów nakładek dla różnych zastosowań
- Zdolność wzmacniania mięśni i łagodzenia ich napięcia

### Konserwacja i przechowywanie

- Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, powinno być odłączone od zasilania.
- Należy chronić urządzenie przed zamoczeniem i wilgocią.
- Nie należy podnosić urządzenia za przewód zasilający.
- Urządzenie może być czyszczone wyłącznie za pomocą ściereczki z miękkiego materiału i łagodnych środków czyszczących.

### ⚠ Uwaga

- Nie zaleca się korzystania z urządzenia kobietom w ciąży i osobom z chorobami serca lub jakimikolwiek obrażeniami fizycznymi. W przypadku wszelkich wątpliwości, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
- Po posiłku należy odczekać godzinę zanim rozpocznie się korzystanie z urządzenia.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować urządzenia na tej samej części ciała jednorazowo dłużej niż 15 minut.
- Nie należy stosować urządzenia, jeśli temperatura otoczenia przekracza 37°C (lub 100°F).
- W przypadku zużycia lub uszkodzenia siatkowanej nakładki ochronnej, należy ją zastąpić nową. W celu jej nabycia proszę skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
- W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

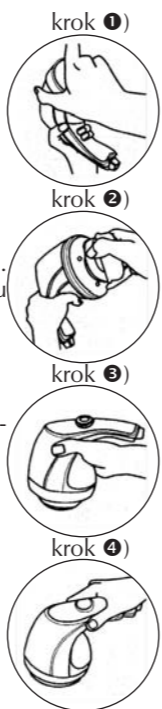

### ⚠ Uwaga:

- Siatkowana nakładka ochronna może być używana wyłącznie z nakładką falistą i nakładką płaską. Nie należy używać siatkowanej nakładki ochronnej razem z nakładką z wypustkami masującymi lub nakładką z mikrowłókien.
- Nie należy stosować urządzenia bez siatkowanej nakładki ochronnej na tych częściach ciała, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wplątania włosów (np. okolice szyi, ramię, itd.).

### Przykłady zastosowania

- Barki – wzmacnia mięśnie ramion
- Brzuch – wyszczupla i kształtuje mięśnie brzucha
- Biodra – kształtuje i wzmacnia mięśnie bioder oraz pośladki
- Ramiona – łagodzi napięcie mięśni barków i pleców
- Łydki – łagodzi napięcie oraz ból mięśni łydek
- Uda – wyszczupla uda, a także łagodzi napięcie mięśni
- Stopy – pomaga usuwać zrogowaciały, przesuszony naskórek

Właściwy sposób użycia siatkowanej nakładki ochronnej



Nieprawidłowy sposób korzystania z urządzenia może skutkować wplątaniem włosów



### DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Nazwa modelu:	Aparat do masażu TM-R10
Zasilanie:	230 V, 50Hz
Pobór mocy:	maks. 25 W
Masa:	1 kg
Urządzenie wykonane z:	ABS
Certyfikat: CE, RoHS	

### ⚠ Uwaga

- Usuwanie zużytych urządzeń elektrycznych. Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu jest umieszczony widoczny obok symbol, oznacza to, że takiego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy go dostarczyć do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. W Unii Europejskiej i w innych krajach Europy działają specjalne systemy zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu w sposób prawidłowy przyczyniasz się do zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w firmie wywożącej odpadki lub od sprzedawcy, u którego został on kupiony.



nakładka z mikrowłókien (do masażu stóp)



nakładka z wypustkami masującymi



nakładka płaska



nakładka falista