

rok zał. 1949

TECH - MED®

ISO ISO
9001 13485 CE

Instrukcja obsługi

PODUSZKA ELEKTRYCZNA OGRZEWAJĄCA

MODEL: TM-B237

ELEKTRYCZNA PODUSZKA OGRZEWAJĄCA

TECH - MED TM-B237

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup elektrycznej poduszki ogrzewającej **TECH - MED** **TM-B237**. Poduszka ta jest wysokiej jakości produktem, który może działać przez wiele lat, pod warunkiem, że będzie prawidłowo używana i konserwowana. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia lub niebezpieczeństwa wskutek błędnego użytkowania. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby znaleźć w niej potrzebne informacje.

Każda osoba używająca tej elektrycznej poduszki ogrzewającej powinna zapoznać się z poniższymi informacjami.

I. OPIS PRODUKTU

Elektryczna poduszka rozgrzewająca **TECH - MED** **TM-B237** z regulacją temperatury przy użyciu podwójnej spirali grzejnej oraz elektronicznego przełącznika jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyróżnia się niezawodnością, szerokim zakresem użycia i podwójną izolacją, a także jest bezpieczna i łatwa w obsłudze.

Ten produkt składa się z dwóch części: maty rozgrzewającej i wełnianej osłony. Matę rozgrzewającą można używać oddzielnie.

II. OPIS PRODUKTU

Elektryczna poduszka ogrzewająca firmy **TECH - MED** wyposażona w dwuwarstwowe zabezpieczenie wszystkich obwodów grzejnych i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo oraz duży komfort użytkowania.

1. Urządzenie jest wyposażone w osłonę przed promieniowaniem elektromagnetycznym, która chroni ludzkie ciało przed falami elektromagnetycznymi. Nie zawiera żadnych substancji zanieczyszczających środowisko.
2. Poduszka elektryczna wyposażona jest w wielostopniowy regulator temperatury, który pozwala wybrać najbardziej komfortową temperaturę zamiast tradycyjnego ustawienia na wysoką, średnią i niską moc grzania. Każdy produkt przechodzi rygorystyczne testy. Wszystkie egzemplarze spełniają takie normy międzynarodowe, jak EN 60335-1:2002 i EN 60335-2-17:2002. Poduszka elektryczna firmy **TECH - MED** nie tylko jest przydatna do ogrzewania się w zimie, ale może być również używana w chłodniejsze deszczowe dni w lecie. Pozwala się ogrzać, gdy w nocy jest zimno.

III. SPOSÓB OBSŁUGI

Położ poduszkę elektryczną płasko na łóżku.

1. Uruchom przełącznik WŁ/WYŁ. Zaświeci się wskaźnik zasilania. Ustaw żadaną temperaturę, przyciskając przycisk regulacji temperatury. Istnieje 5 ustawień, przy czym 1 świecący się wskaźnik oznacza niską moc grzania, 2 — średnią, 3 — wyższą, a 4 i 5 — jeszcze wyższą. Funkcja grzania o wysokiej mocy działa tylko przez ograniczony czas. Po grzaniu z najwyższą mocą przez około godzinę regulator automatycznie przestawia się na niską moc, aby zapobiec poparzeniu skóry.
3. Możesz ustawić czas, naciskając przycisk regulacji czasu. Są 4 wskaźniki i 8 opcji ustawienia czasu (od 1 do 8 godzin) do wyboru. Po upływie ustawionego czasu regulator automatycznie wyłączy grzanie.
4. System zabezpieczenia przed przegrzaniem. W przypadku nieprawidłowego korzystania z poduszki może nastąpić jej przegrzanie. Migają wtedy wskaźniki temperatury i wszystkie przyciski są nieaktywne, a regulator wyłącza grzanie. W takiej sytuacji należy wyłączyć przełącznik, pozwolić poduszce ostygnąć, a następnie włączyć go ponownie. Jeśli ta sytuacja się powtórzy, oznacza to przepalenie się przewodu. Należy wtedy zaprzestać korzystania z produktu.

Gdy poduszka elektryczna jest włączona, regulator musi znajdować się w miejscu, gdzie łatwo będzie z niego korzystać. Nie należy kłaść regulatora pod kołdrą lub poduszką, ani przykrywać innymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie się i uszkodzenie produktu, a nawet wypadek.

IV. CODZIENNE OGLĘDZINY I KONSERWACJA

1. Kontrola zewnętrzna: przed użyciem należy sprawdzić, czy elementy sterujące są nienaruszone i przewód elektryczny nie jest uszkodzony. W razie jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać produktu, lecz oddać go do serwisu.
2. Przechowywanie: urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie należy na nim niczego kłaść ani go składać.
3. Czyszczenie: wełnianą osłonę można prać w pralce podobnie jak ubrania z pluszu. Maty rozgrzewającej znajdującej się wewnątrz wełnianej osłony nie można prać.

V. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używać, jeśli urządzenie jest złożone.
2. Nie wbijać szpilek ani pinezek.
3. Nie moczyć.
4. Nie wyjmować wtyczki z gniazda, ciągnąc za przewód zasilania. Przewodu zasilania nie można wymienić; w przypadku uszkodzenia przewodów elektrycznych urządzenie jest niezdatne do użytku.
5. Nie naprawiać samodzielnie i nie zezwalać na korzystanie z urządzenia przez dzieci i osoby niewrażliwe na ciepło.
6. To urządzenie nie może być używane w szpitalach;
7. Nie należy zasypiać w obecności włączanego urządzenia ze względu na zasilanie elektryczne.
7. Nie prać na mokro ani chemicznie wewnętrznej maty rozgrzewającej.
8. **Ostrzeżenie! Nigdy nie zasypiać na działającej poduszce rozgrzewającej.**

9. Zbyt długie korzystanie grozi poparzeniem skóry.

10. Nie ciąć maty rozgrzewającej, nie dziurawić jej, ani nie nakłuwać igłami lub innymi ostrymi przedmiotami.
11. Nie ciągnąć za przewód zasilania, nie demontować przełącznika elektrycznego.
12. Chronić regulator i przewód zasilania przed wilgocią i zalaniem.
13. Urządzenia nie można włączyć za pomocą regulatora czasowego.
14. Nie kłaść regulatora na lub pod urządzeniem, ani go nie przykrywać, gdy urządzenie działa.

Gdy urządzenie działa:

- nie kłaść na nim żadnych dużych lub ciężkich przedmiotów, jak walizki itp.;
- nie kłaść na nim żadnych źródeł ciepła, jak termofory, poduszki rozgrzewające lub podobne przedmioty;
- uważać, aby nie przykryć regulatora pościelą, poduszką lub innym przedmiotem, na którym zostanie następnie położona poduszka rozgrzewająca.
- Nie składać maty rozgrzewającej, gdy jest rozgrzana.
- Regularnie oglądać matę rozgrzewającą i przewód zasilania pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Gdy urządzenie nie jest używane, odłączyć je od gniazda sieci elektrycznej. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu. Uważać, aby nie kłaść na nim dodatkowego ciężaru.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

VI. NAPRAWA

UWAGA: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ NAPRAWIANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY WYKWALIFIKOWANE. W CELU PRZEPROWADZENIA NAPRAWY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FABRYKĄ. URZĄDZENIA NIE NALEŻY NAPRAWIAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

VII. GWARANCJA

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją od daty zakupu potwierdzonej pieczętą i podpisem sprzedawcy oraz paragonem fiskalnym, który musi być dołączony do niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje skutków wypadku, nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy stosować wyłącznie załączone do produktu akcesoria. Zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów niż zatwierdzone może wiązać się z utratą gwarancji. Nie należy otwierać urządzenia. W przypadku stwierdzenia otwarcia lub ingerencji w obudowę urządzenia, gwarancja automatycznie traci ważność. Gwarancja nie obejmuje części podatnych na zużycie ani baterii (jeśli były załączone). Gwarancja traci ważność po roku od daty zakupu. Po upływie tego czasu, wszelkie usługi serwisowe są płatne. Więcej informacji na temat serwisu technicznego, zarówno w ramach gwarancji, jak i usług odpłatnych, można uzyskać pod adresem techmed@techmed.pl. Naprawa lub wymiana produktu dokonana w ramach niniejszej gwarancji nie podlega żadnej formie rekompensaty. Zabrania się korzystania z produktu w miejscach publicznych. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia osób, mienia bądź zwierząt domowych spowodowane nieprzestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji obsługi, zwłaszcza ostrzeżeń związanych z instalacją, eksploatacją i konserwacją urządzenia. Polityka firmy **TECH - MED** zakłada nieustanne udoskonalanie oferowanych przez nią produktów, dlatego firma **TECH - MED** zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów, częściowo lub w całości, bez uprzedzenia i zgodnie z wymogami produkcyjnymi, z wyłączeniem jakiegokolwiek odpowiedzialności firmy **TECH - MED** oraz jej dystrybutorów.



Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

.....
Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

B. WÓJCIK s-ka jawna

02-735 Warszawa, ul. Studencka 49

Tel. (022) 853 30 10,

e-mail: techmed@techmed.pl

www.techmed.pl

S k l e p f i r m o w y

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98

Tel. (022) 654 64 92, Fax (022) 620 77 42

Przed użyciem poduszki prosimy przeczytać instrukcję.

Życzymy Państwu dużo zdrowia